



# Créez votre monde avec **Initial** de **GC**.

Un système de céramiques pour toutes les indications

## Teintes gencive (Gum shades)

Coffret GC Initial Gum Shades MC • Coffret GC Initial Gum Shades Zr



*initial*  
www.gcinitial.gceurope.com

Le système Initial est une gamme de six céramiques spécialisées qui peuvent être utilisées pour créer des restaurations céramo-métallique et tout céramique, pour toutes les indications quels que soient la procédure et le type d'armature. Pour plus d'informations sur notre système complet Initial, demandez notre brochure.

Pour réaliser des restaurations gingivales de plus en plus esthétiques et naturelles, le système de céramique Initial propose des teintes gingivales très diverses. Les teintes gencives des coffrets Initial MC et Initial Zr répondent aux exigences esthétiques, pour une transition des plus naturelle et une créativité illimitée... Elles sont basées sur le teintier du composite de laboratoire Gradia Gum.



**GC**



## GC Initial Gum Shades: Coffret GC Initial Gum Shades MC • Coffret GC Initial Gum Shades Zr

Parallèlement à la croissance de suprastructure implantaire, il existe une demande des prothésistes dentaires sur la caractérisation individuelle des tissus mous en céramique. Pour leur permettre de réaliser cette transition naturelle de la couronne à la gencive, GC propose des coffrets adaptés et faciles à utiliser : Initial Gum Shades.

Ces nouveaux matériaux sont parfaitement indiqués dans les zones de suprastructures implantaires, couronnes et prothèses fixées. Ils suivent logiquement le concept Initial: « **Un système de teinte – une technique de montage** »



Photos de MDT Mike Richter, Allemagne

### Transition invisible – harmonie naturelle

Toutes caractéristiques gingivales, même les plus spécifiques peuvent parfaitement être reproduites avec les cinq teintes existantes mélangeables entre-elles, analogues aux tissus gingivaux. De la même façon que pour la technique des facettes sur matériaux réfractaires, les étapes individuelles peuvent être divisées entre les différentes cuissons – selon les indications et les habitudes personnelles de travail.

#### Coffret GC Initial MC Gum Shades, pâte opaque Coffret GC Initial MC Gum Shades, poudre opaque

Le coffret Initial MC Gum Shades est disponible en 2 versions pâte et poudre et en cinq teintes : base light (base légère), base dark (base foncée), intensive violet (violet intensif), cream intensive (crème intensive) et intensive red (rouge intensif)

#### Coffret GC Initial Zr Gum Shades

Le Initial Zr Gum Shades contient le Zr Frame Modifier FM-5 au lieu du matériau opaque.

Bien évidemment, les teintes sont disponibles individuellement.

### Spécifications techniques

Propriétés	GC Initial MC	GC Initial Zr
Cuisson dentine (°C)	890	810
CET (25-500°C;10-6xK-1)	2 <sup>nd</sup> /4 <sup>ème</sup> cuisson 13.1/13.3	2 <sup>nd</sup> /4 <sup>ème</sup> cuisson 9.4/9.4
Température de transformation du verre (°C)	575	550
Solubilité (µg/cm <sup>2</sup> )	25	12
Densité (µg/cm <sup>2</sup> )	2.52	2.43
Résistance à la flexion (Mpa)	84	90
Force d'adhésion (Mpa)	50	-
Taille moyenne des particules (µm; D 50%)	25	21.5

GC Initial MC et GC Initial Zr selon EN ISO 9693:2000  
(Les valeurs techniques/physiques données sont issues de tests internes.)

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Interleuvenlaan 33  
B – 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

#### GC FRANCE s.a.s.

9 bis, Avenue du Bouton d'Or – BP 166  
F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex  
Tel. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.49.80.37.90  
info@france.gceurope.com  
www.france.gceurope.com

#### GC BENELUX B.V.

Edisonbaan 12  
NL - 3439 MN Nieuwegein  
Tel. +31.30.630.85.00  
Fax. +31.30.605.59.86  
info@benelux.gceurope.com  
www.benelux.gceurope.com

#### GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office  
Wilerstrasse 3  
CH – 9545 Wängi  
Tel. +41.52.366.46.46  
Fax. +41.52.366.46.26  
info@switzerland.gceurope.com  
www.switzerland.gceurope.com

