



BITE CRYSTAL 70 **BITE SCAN 85**

INSTRUCTIONS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Bite Crystal 70 et Bite Scan 85 sont des matériaux d'empreinte uniques sous forme de mousse conçus pour prendre la prise d'occlusion.

Ce sont des polyvinylsiloxanes (PVS) qui se polymérisent par addition en utilisant une cartouche auto-mélangeante.

UTILISATION

Préparation du modèle

Enlever et jeter le bouchon de la cartouche.

Charger le pistolet mélangeur avec la cartouche et l'embout de mélange approprié. Pour éviter la formation de bulles d'air, toujours conserver l'embout rempli du matériau d'impression.

Pour une extrusion directement sur les dents, utiliser l'embout intra-oral.

Application

Procéder à l'extrusion. Retirer l'impression selon le temps total.

Rincer doucement et désinfecter.

Propriétés de travail

Matériau	Bite Crystal 70	Bite Scan 85
Scannable	Non	Oui
Temps de travail	2.00 minute	30 sec.
Temps de prise	1.00 minutes	1 minute
Temps total	3.00 minutes	1 min. 30 sec.
Notes :		
Les temps mentionnés sont mesurés à 23°C (73 °F) avec une humidité relative de 50%. Les températures plus élevées réduisent ces temps, et inversement une température plus basse augmente ces temps.		

DÉSINFECTION

Une fois retiré de la bouche, rincer l'impression à l'eau tiède. Les empreintes peuvent être désinfectées avec des solutions standards de désinfections

PRÉCAUTIONS

- Le contact avec des gants en latex peut nuire à la réaction de prise. Il est recommandé de porter des gants en vinyle.
- Éviter le contact avec le soufre, l'eugénol ou les amines qui peuvent empêcher la prise d'occlusion.
- Certains cordons de rétraction gingivale contenant des sulfures peuvent entraîner le déchaussement des zones sulfureuses.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.

STOCKAGE

Stocker à une température entre 10-25 °C. Éviter l'exposition directe à la lumière. Entreposer les cartouches utilisées avec l'embout de mélange, jamais avec le bouchon de la cartouche, pour éviter une contamination croisée et/ou créer une polymérisation prématurée. L'embout est pour une unique utilisation et devra être remplacé par un autre embout pour une utilisation subséquente.

Pour commander : DENPLUS Inc.
333-M Chemin du Tremblay, Boucherville, QC, Canada, J4B 7M1
Tél. : (450) 641-1330 ou sans frais : 1 (888) 344-4424
Fax : (450) 600-8309 ou sans frais : 1 (888) 481-0309
www.denplus.com