


SMART OCCLUSION





La Smart Occlusion est une technique simple que chaque technicien dentaire peut appliquer quotidiennement dans son laboratoire.

Avec cette technique, vous pouvez ajuster parfaitement la hauteur de vos restaurations en évitant ainsi les corrections occlusales en bouche.


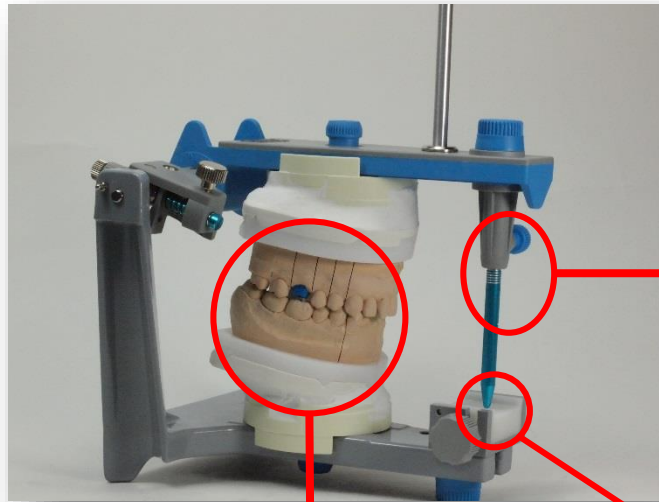


Models en intercuspitation maximale


Tige à zéro



Tige en contact avec la table

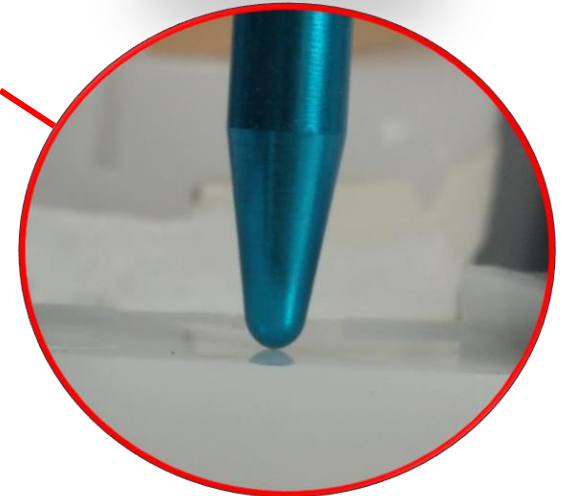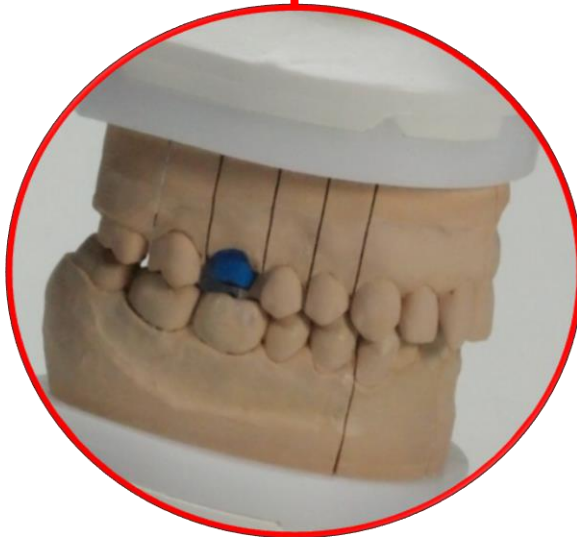


Smart Occlusion / Etape n ° 1

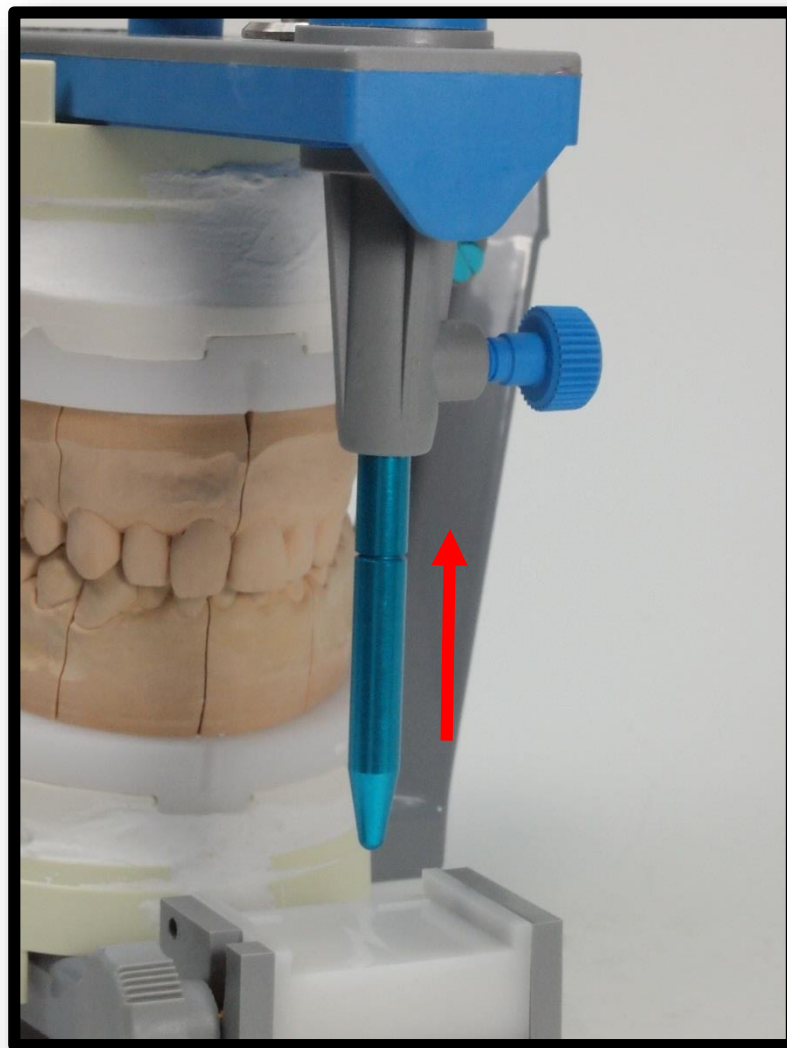


Reveler la tige incisale

Smart Occlusion / Etape n ° 2


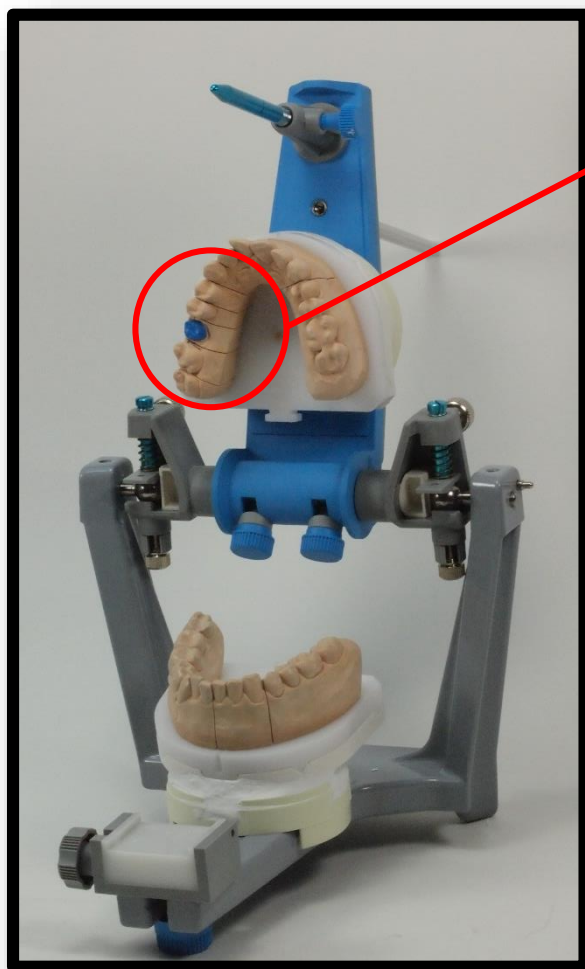


Ne garder que les dents adjacent au travail à réaliser

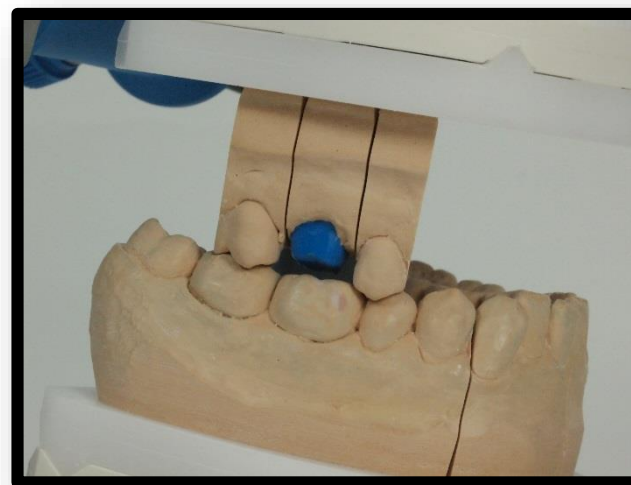


Smart Occlusion / Etape n ° 3

Libérer les boîtiers condyliens

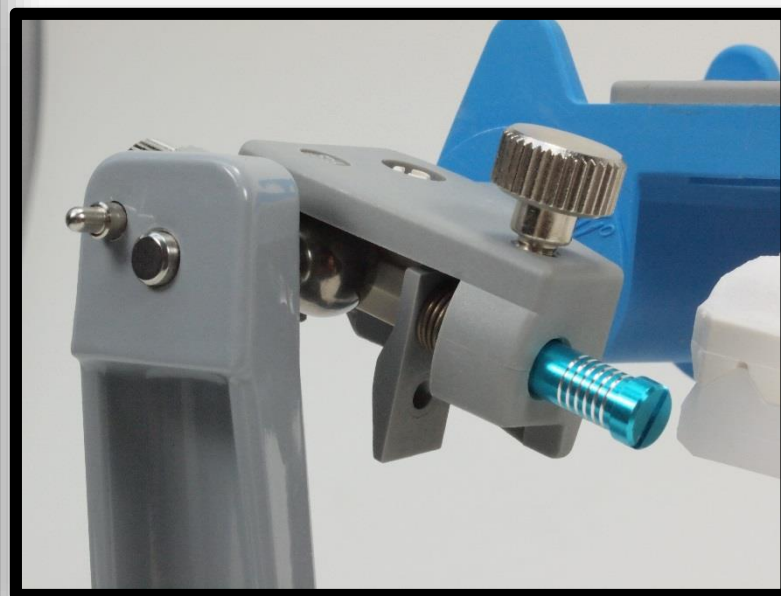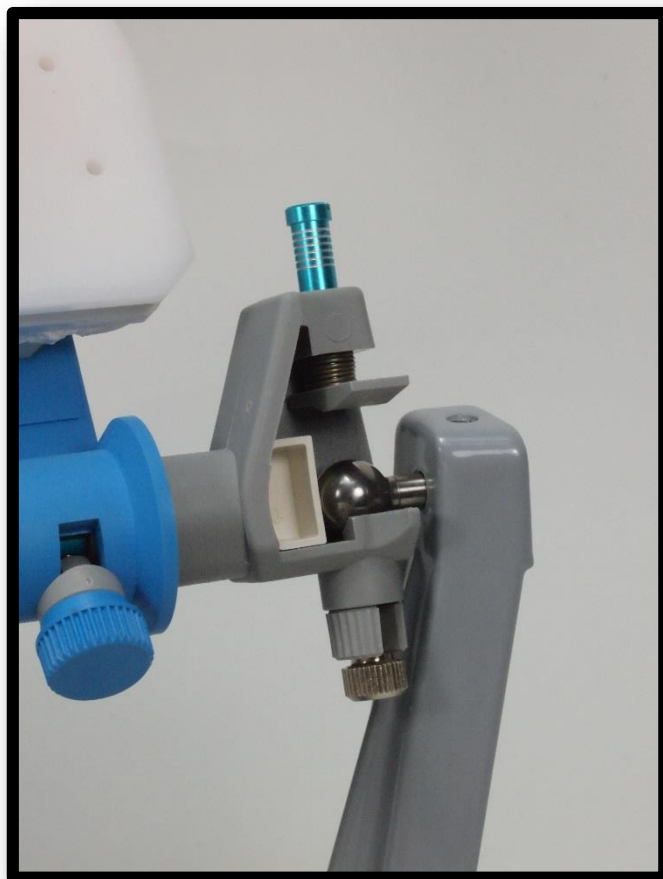


Smart Occlusion / Etape n ° 4

Mettre les models en intercuspidation maximale

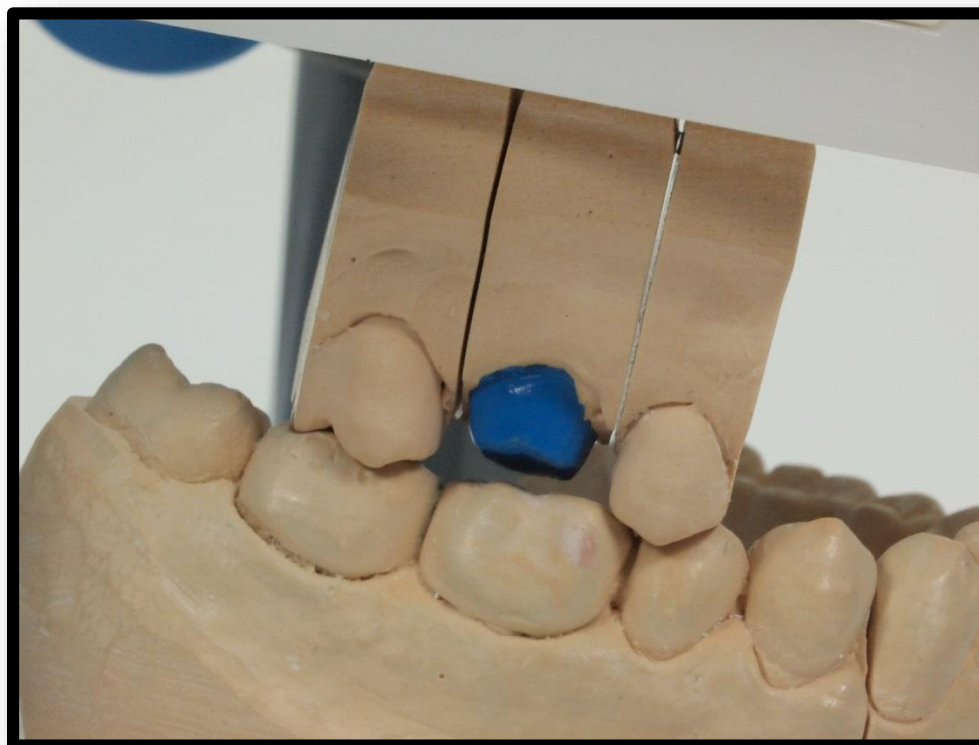


Smart Occlusion / Etape n ° 5

*Redescendre la tige incisale en
contact avec la table*

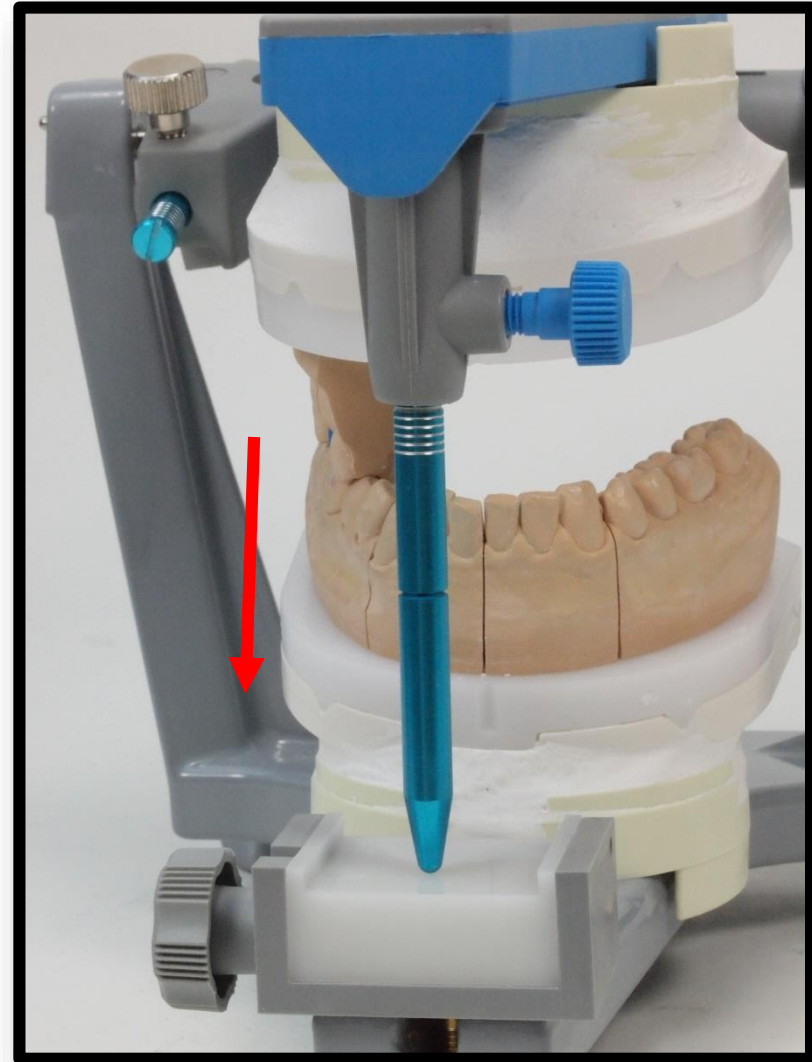


Smart Occlusion / Etape n ° 6

Refermer les boîtiers condyliens

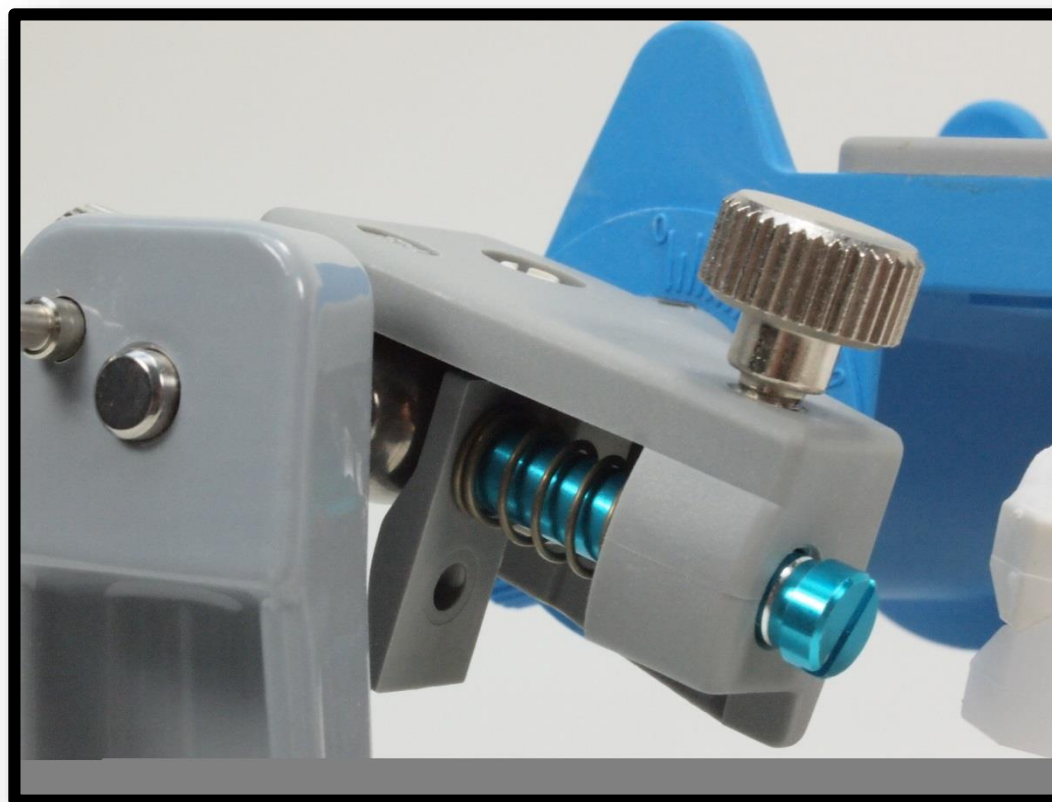


Smart Occlusion / Etape n ° 7

Remettre tous les dies sur le model

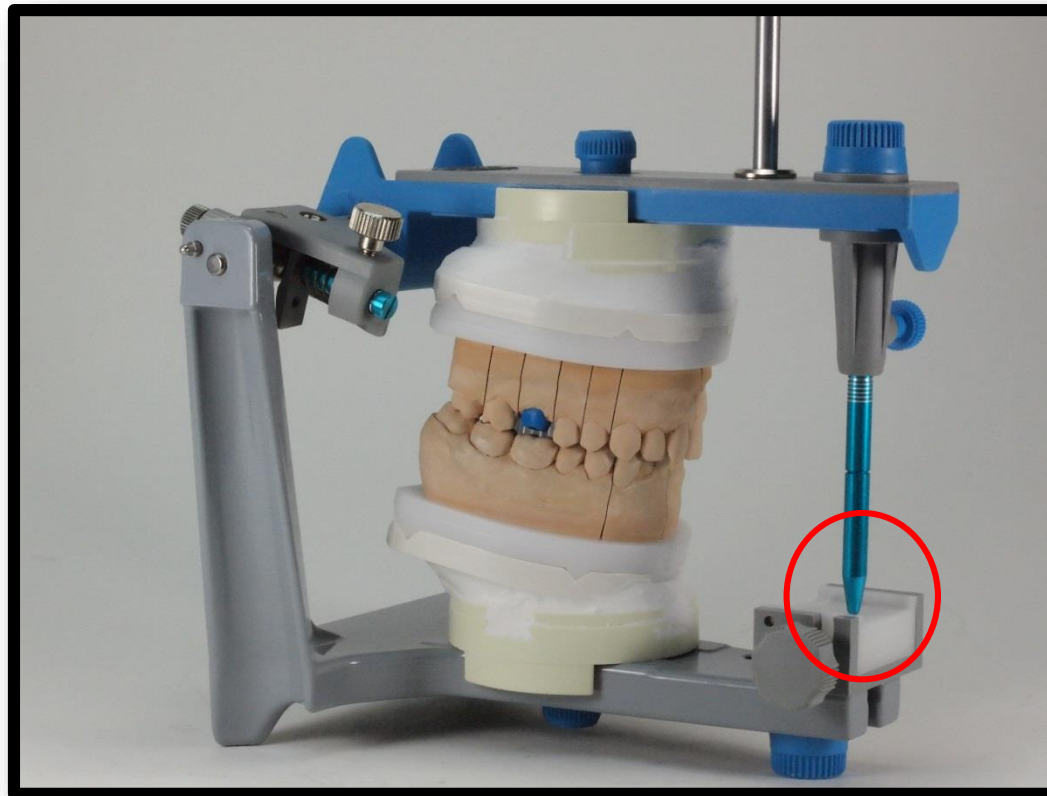


Smart Occlusion / Etape n ° 8

La tige incisale ne touche plus la table !!!

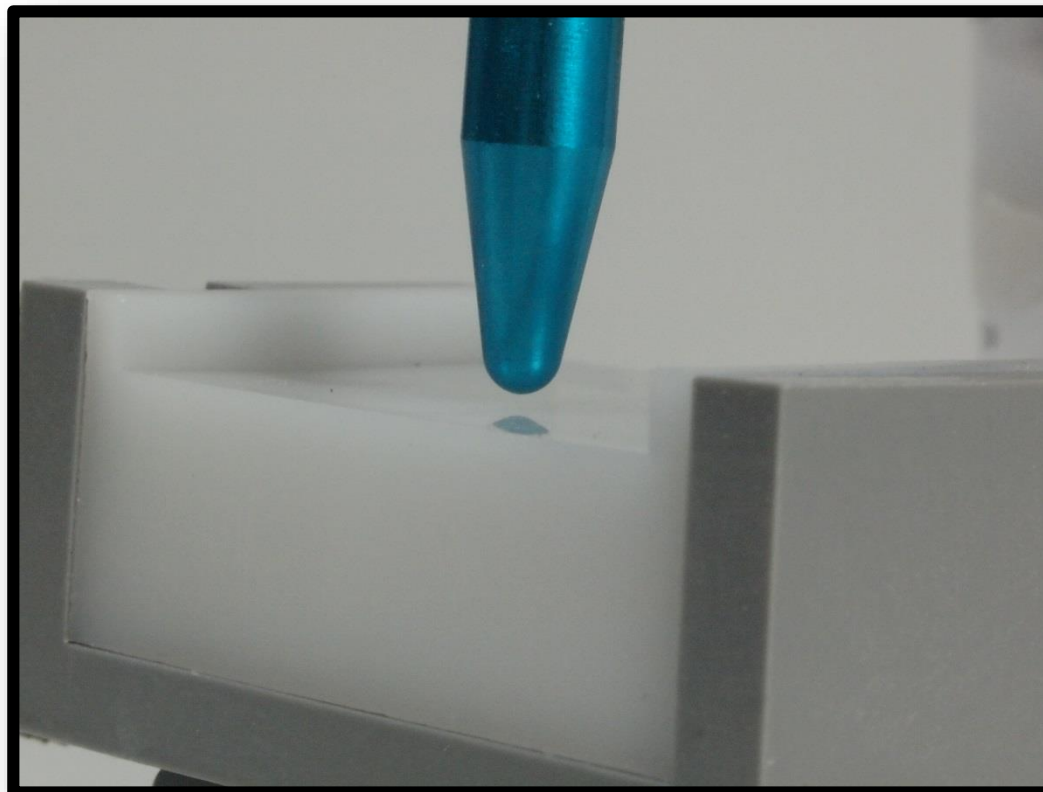


Smart Occlusion / Etape n ° 9

Marquer les points de contact avec du papier (40 μ)

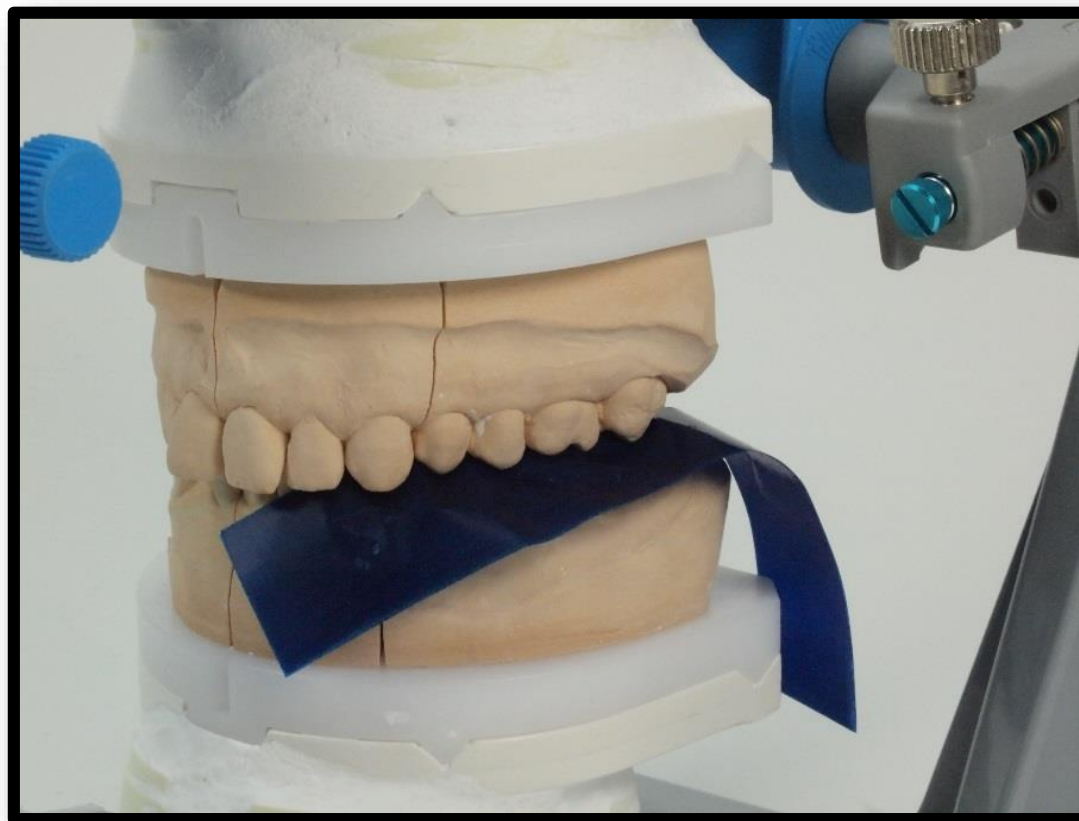


Smart Occlusion / Etape n ° 10

Retoucher les points de contact jusqu'à ce que la tige incisale retouche la table

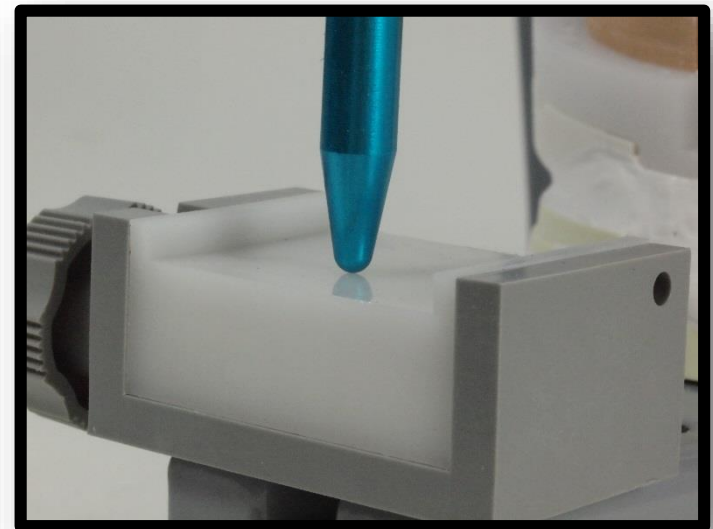



Vos models sont maintenant réglés en intercuspidation maximale

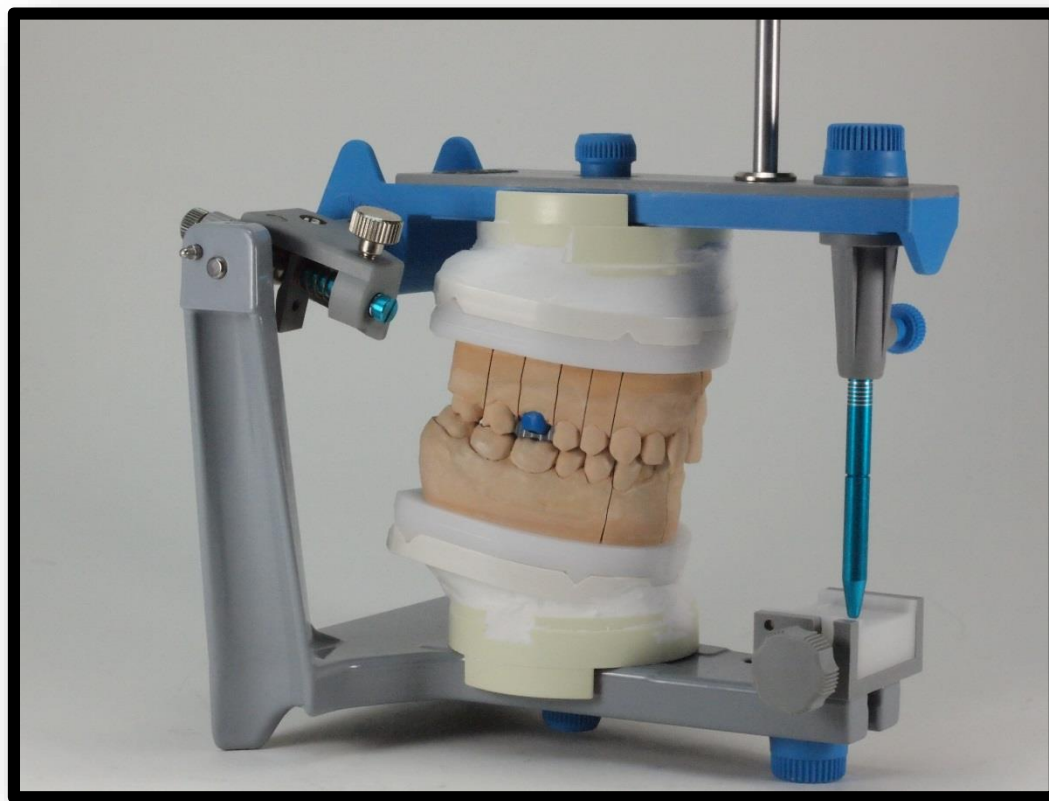



PLUS DE:

Dépenses Supplémentaires

Patients Mécontents

Dentistes Mécontents

Techniciens Mécontents