

ACRYLIQUES



En 1997, nos deux fondateurs de l'entreprise ont lancé DenPlus. L'un des fondateurs, un docteur en chimie, a développé une gamme d'acryliques pour les applications dentaires, initiant ainsi la genèse de DenPlus. Au cours des 25 dernières années, notre chimiste a continuellement fait évoluer et amélioré nos acryliques et nous comptons aujourd'hui des centaines d'utilisateurs satisfaits à travers le Canada et les États-Unis. À ce jour, nous continuons fièrement à fabriquer des acryliques dentaires dans notre usine de Boucherville, Québec, soutenant ainsi l'économie canadienne.

1-888-344-4424
www.denplus.com

IMPACT-20: Vitesse sans compromis



IMPACT-20 est un acrylique thermopolymérisable de première qualité résistante à l'impact, conçu pour la fabrication de prothèses complètes et partielles. Il durcit en seulement 20 minutes à 100°C (ou 1,5 heures à 73°C + 30 minutes à 100°C) sans perte de résistance, sans porosités ni augmentation de monomère résiduel. Il est conçu pour ceux qui ont besoin de temps de cuisson plus rapides dans le cadre de leur flux de travail. Temps de prise 7 minutes. Temps de travail 30 minutes.

DESCRIPTION

Intro kit:
Écono kit:
Lab kit:
Impact-20 poudre:
Impact-20 poudre:
Impact-20 poudre:
20 Minutes liquide:
20 Minutes liquide:

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
1L liquide



TEINTES:

ORI, VIR, LPL, LPI, MDP, SPI, SPL, RPI

IMPACT-PLUS: Pour les traditionalistes

IMPACT-PLUS est notre premier acrylique polymérisable à chaud de qualité supérieure pour les prothèses complètes et partielles. Il a un temps de polymérisation traditionnel de 1,5 heure à 73°C + 30 minutes à 100°C, ou de 9 heures à 73°C. Il est conçu pour ceux qui préfèrent la polymérisation « de nuit » des prothèses. Grâce à son temps de travail extra long, il permet le bourrage de plusieurs mouffles sans stress. Temps de prise 12 min. Temps de travail 40 minutes.

DESCRIPTION

Intro kit:
Écono kit:
Lab kit:
Impact-Plus poudre:
Impact-Plus poudre:
Impact-Plus poudre:
DP-HC liquide:
DP-HC liquide:

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
1L liquide



TEINTES:

ORI, VIR, LPL, LPI, MDP, SPI, SPL, RPI

DP97: Quand l'économie est valorisée

DP97 est l'une de nos formulations originales et a résisté à l'épreuve du temps. C'est le choix lorsque l'objectif est une économie maximale. Il a un temps de polymérisation traditionnel de 1,5 heure à 73°C + 30 minutes à 100°C, ou de 9 heures à 73°C. Temps de prise 11 min. Temps de travail 60 minutes.

DESCRIPTION

Intro kit:	1lb poudre + 240ml liquide
Écono kit:	5lb poudre + 1L liquide
Lab kit:	25lb poudre + 4x 1L liquide
DP97 poudre:	1lb (454g)
DP97 poudre:	5lb (2.3kg)
DP97 poudre:	25lb (11.3kg)
DP-HC liquide:	240ml liquide
DP-HC liquide:	1L liquide

FORMAT



TEINTES:

ORI, LPL, MDP, CLR

DP20: Quand l'économie est valorisée

DP-20 est un acrylique thermopolymérisable économique, CLAIR SEULEMENT, pour les prothèses complètes et partielles. Il a un temps de polymérisation de 20 min. à 100°C.

TEINTE:
CLR

DESCRIPTION

Intro kit:	1lb poudre + 240ml liquide
Écono kit:	5lb poudre + 1L liquide
Lab kit:	25lb poudre + 4x 1L liquide
DP-20 poudre:	1lb (454g)
DP-20 poudre:	5lb (2.3kg)
DP-20 poudre:	25lb (11.3kg)
20 Minutes liquide:	240ml liquide
20 Minutes liquide:	1L liquide

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
1L liquide

DP-REPAIR: Réparation offert en 7 couleurs

DP-REPAIR est une résine acrylique auto-polymérisante pour les réparations conçue pour correspondre aux couleurs de la gamme de résines acryliques DenPlus. Disponible en Rapide (temps de gel 1 minute) et Régulier (temps de gel 5 minutes).

TEINTES:
ORI, LPL, LPI, MDP, SPL, RPI

DESCRIPTION

Intro kit:	1lb poudre + 240ml liquide
Écono kit:	5lb poudre + 1L liquide
Lab kit:	25lb poudre + 4x 1L liquide
DP-Repair poudre:	1lb (454g)
DP-Repair poudre:	5lb (2.3kg)
DP-Repair poudre:	25lb (11.3kg)
(Tous offerts en version Rapide ou Régulier)	

FORMAT

DP-Repair liquide:	240ml liquide
DP-Repair liquide:	1L liquide

HIGH-WAVE:

Résine pour cuisson par micro-onde



Ceux qui polymérisent l'acrylique au micro-ondes ne jurent que par le processus et adorent la rapidité. HIGH-WAVE est un acrylique résistant à l'impact qui permettra d'obtenir des prothèses solides, durables et exemptes de porosités. Le temps de polymérisation est de seulement 3 minutes à 700 W. Temps de prise 8 minutes. Temps de travail 35 minutes.

DESCRIPTION

Intro kit:
Écono kit:
Lab kit:
High-Wave poudre:
High-Wave poudre:
High-Wave poudre:
High-wave liquide:
High-wave liquide:

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
1L liquide



TEINTES:
ORI, VIR, LPL, MDP

POUR-PLUS:

L'Européen

En Europe, la résine de coulée est la méthode de choix pour la plupart des prothèses dentaires. Elle est rapide et efficace et permet d'obtenir des prothèses tout aussi durables que celles bourrées sous pression ou injectées, avec une couleur stable. Temps de travail 2 à 3 minutes. Temps de durcissement 15 min. dans un pot sous pression à 55-60°C.



TEINTES:
ORI, LPL, MDP

DESCRIPTION

Intro kit:
Écono kit:
Lab kit:
Pour-Plus poudre:
Pour-Plus poudre:
Pour-Plus poudre:
Pour-Plus liquide:
Pour-Plus liquide:

FORMAT


1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 2x 500ml liquide
25lb poudre + 8x 500ml liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
500ml liquide

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

RÉSINE	CUISSON	IMPACT (pi-lb/po)	FLEXION (MPa)	MODULUS (MPa)
<i>Lucitone 199*</i> :	70°C-90min + 100°C-30min	0.47	66.4	1897
<i>Impact-Plus:</i>	70°C-90min + 100°C-30min	0.46	73.1	2460
<i>Impact-Plus:</i>	70°C-9h	0.46	70.6	1780
<i>Impact-20:</i>	70°C-90min + 100°C-30min	0.41	77.3	2720
<i>Impact-20:</i>	100°C-20min	0.41	73.2	2320
<i>High-Wave:</i>	3(700W)	0.37	71.4	2560
<i>DP97:</i>	70°C-90min + 100°C-30min	0.30	72.0	2337

Standard ISO 20795-1:2013 (denture acrylic)
Flexion: min 65 MPa
Modulus: min 2000 MPa
*Marques enregistrées de Dentsply/Sirona

Les couleurs ORI et VIR sont similaires. La couleur VIR étant plus opaque, elle permet de mieux cacher les structures métalliques. La photo suivante illustre la différence.

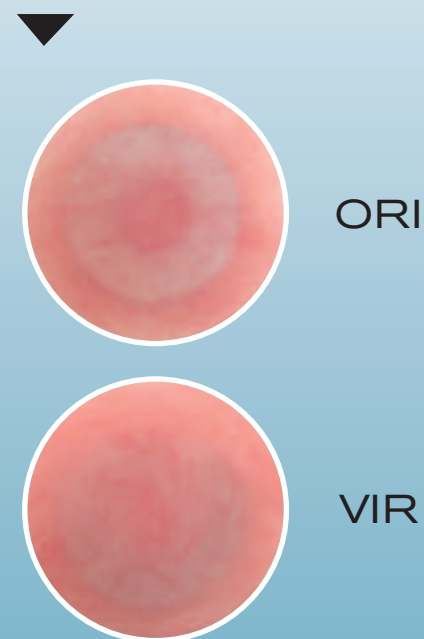

▲ A titre indicatif, l'image suivante illustre les différentes couleurs. Notez qu'il s'agit uniquement d'un guide et que la couleur varie en fonction du processus d'impression ou des paramètres de votre écran d'ordinateur.

DP-ORTHO: Acrylique orthodontique haut de gamme



POUDRE AUSSI DISPONIBLE:

blanc, noir, rose

*COULEURS DE CONCENTRÉ:

noir, bleu, jaune, vert,
rouge, orange, mauve

DP-ORTHO est une résine acrylique auto-polymérisable utilisée pour fabriquer des appareils orthodontiques. Convient à la technique «sel et poivre», également auto-versable ou thermo-durcissable. Les poudres DP-ORTHO se présentent sous deux formats avec des tailles de particules variables: C (grossière – 90 microns) et F (fine – 65 microns). Trois couleurs de liquides sont disponibles (transparent, cristal et rose) et quatre concentrés sont également disponibles pour permettre une caractérisation spécifique des appareils.

DESCRIPTION

Intro kit C ou F:
Écono kit C ou F:
Lab kit C ou F:
Intro kit C ou F avec liquide coloré:
Écono kit C ou F avec liquide coloré:
Lab kit C ou F avec liquide coloré:
Ortho-C ou F poudre:
Ortho-C ou F poudre:
Ortho-C ou F poudre:
Liquide:
Liquide:
Kit concentré de couleurs:
Recharge concentré de couleur:

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb poudre + 240ml liquide coloré
5lb poudre + 1L liquide coloré
25lb poudre + 4x 1L liquide coloré
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml (rose, cristal et clair)
1L (rose, cristal et clair)
50ml (bouteilles de chaque couleur*)
50ml

PREMIUM TRAY: Acrylique pour porte-empreinte individuel et plaque base



POUDRES:

jaune, blanc, rose, bleu

PREMIUM TRAY est un acrylique auto-polymérisant exceptionnel pour porte-empreinte individuel et plaque-base. Il est non-collant et peut être manipulé après quelques secondes. PREMIUM TRAY est disponible avec deux types de liquides. Rapide (F): Temps de gel 20-30 sec, temps de travail 2-3 min et temps de prise 6-7 min Régulier (R): Temps de gel 30-45 sec, temps de travail 4-5min et temps de prise 8-9 min.

DESCRIPTION

Intro kit:
Écono kit:
Lab kit:
Premium Tray poudre:
Premium Tray poudre:
Premium Tray poudre:
DP-Tray Liquide Rapide ou Régulier:
DP-Tray Liquide Rapide ou Régulier:

FORMAT

1lb poudre + 240ml liquide
5lb poudre + 1L liquide
25lb poudre + 4x 1L liquide
1lb (454g)
5lb (2.3kg)
25lb (11.3kg)
240ml liquide
1L liquide



1-888-344-4424
www.denplus.com