

## Mélangeur à alginate

### **Usage**

Cet appareil est conçu pour mélanger uniquement de l'alginate en poudre et de l'eau. Ne l'utilisez pas pour d'autres matériaux, liquides et produits chimiques.

### **Sécurité**

- 1) L'appareil doit être utilisé par des professionnels et des personnes désignées.
- 2) Il doit être mis dans l'endroit sec et non exposé à l'eau ou à tout autre liquide.
- 3) Il doit être placé de manière stable et sans aucune inclinaison ou possibilité d'impact.
- 4) Il doit être loin des produits chimiques et des gaz chimiques.
- 5) La puissance doit être appliquée avec la tension et le courant (110V AC – 60 Hz) requis et assurez-vous que la prise a une mise à la terre de sécurité.

### **Caractéristiques**

Dimension: 226 x 220 x 190 mm

Poids: 2,6 kg

Vitesse faible: 120 tr / min

Haute vitesse: 250 tr / min

Alarme régulière: 20 s

### **Opération**

- Alimentation principale: un interrupteur noir derrière la machine.
- Bol de mélange: placez-le sur le plateau sur le dessus de l'appareil. Dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bol dans le plateau, il sera verrouillé. En sens contraire, le bol de mélange peut être retiré.
- Bouton Start/Set: le bouton "Start/Set" se trouve sur le côté gauche du panneau avant. La première pression engage la faible vitesse; le mélangeur passera à la grande vitesse après avoir appuyé à nouveau le bouton "Start/Set".
- Bouton Arrêt: le bouton "Arrêter" se trouve sur le côté droit du panneau avant. Appuyez sur le bouton "Arrêter" pour stopper le moteur immédiatement.

- 1) Mettez le bol mélangeur nettoyé et désinfecté sur le mélangeur, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- 2) Allumez l'interrupteur d'alimentation.
- 3) Mettez l'eau et l'alginate pour l'impression dans le récipient de mélange en fonction de la proportion recommandé par le fabricant. Ensuite, mélangez-les légèrement.
- 4) Mettez la spatule dans le mélange, appuyez sur le bouton "Start/Set" pour démarrer à basse vitesse (le liquide et la poudre ne se déversent pas facilement à faible vitesse), placez la spatule le long du bol mélangeur et déplacez-la selon le sens de rotation.
- 5) Appuyez à nouveau sur la touche "Start/Set" pour enclencher la haute vitesse. La spatule doit se déplacer le long du mur du bol à mélanger. Après 20 secondes, la lumière de l'alarme clignotera pour indiquer à l'utilisateur la fin du mélange.
- 6) Appuyez sur le bouton "Arrêter" pour arrêter de fonctionner. Utilisez une spatule le long du bol pour retirer le mélange.
- 7) Dans le sens inverse, tournez le bol à mélanger, puis sortez-le et nettoyez-le